

Pfannenrevisionschalen nach Burch-Schneider und Müller



BEST QUALITY

MADE IN GERMANY

PFANNENREVISIONSSCHALEN NACH BURCH-SCHNEIDER UND MÜLLER

Zur Rekonstruktion des Acetabulums

Burch-Schneider

Die Revisionschale nach Burch-Schneider besteht aus Titan Grade 1 (ISO 5832-2) und ist in 4 Größen, jeweils in links u. rechts-Ausführung erhältlich. Die Größen entsprechen den Durchmessern der PE-Pfannen, die in die jeweilige Revisionschale eingebracht werden. Dabei wird eine Zementmanteldicke von 1 mm zwischen Revisionschale und PE-Pfanne erreicht. Demzufolge ist der tatsächliche Außendurchmesser der Revisionschale 6 mm größer als die angegebene Größe. Die Revisionschale nach Burch-Schneider verfügt über eine kraniale und kaudale Lasche. Die kraniale Lasche dient der Befestigung auf dem Os Ilium. Die kaudale Lasche wird in das Os Ischium eingeschlagen. Alternativ kann diese auch auf dem Os Ischium verschraubt werden.

Mit der Revisionschale nach Burch-Schneider kann eine starke Acetabulumschädigung überbrückt und diese am gesunden, stabilen Knochen befestigt werden.

Müller

Die Revisionschale nach Müller wird verwendet, um eine stabile Verankerung im gesunden Knochen zu erreichen und das anatomische Rotationszentrum wiederherzustellen. Sie ist in 9 Größen verfügbar. Diese Größen entsprechen jeweils den Durchmessern der PE-Pfannen, die in die jeweilige Revisionschale eingebracht werden. Dabei wird eine Zementmanteldicke von 1 mm zwischen Revisionschale und PE-Pfanne erreicht. Die Revisionschale nach Müller besitzt einen kranialen Rand. Dieser dient zur Befestigung auf dem Os Ilium.




PFANNENREVISIONSSCHALE MÜLLER

- Verankerung: zementfrei
- Material: Titan Grade 1 (ISO 5832-2)
- Kombinierbar mit: PE-Pfannen wie z. B. der Müller II Pfanne
- Ausführung: anatomisch neutrale Variante
- Größen: 9 Größen in 2 mm Abstufungen Außen- \varnothing 42–58 mm

INSTRUMENTE

Ein kompaktes Instrumenten Set für einen sicheren Operationsverlauf.

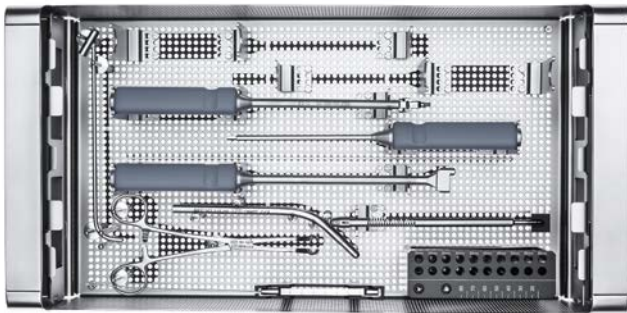

PFANNENREVISIONSSCHALE BURCH SCHNEIDER

- Verankerung: zementfrei
- Material: Titan Grade 1 (ISO 5832-2)
- Kombinierbar mit: PE-Pfannen wie z. B. der Müller II Pfanne
- Ausführung: rechts/links Varianten
- Größen: 4 Größen in 6 mm Abstufungen Außen- \varnothing 44–62 mm

INSTRUMENTE

Zwei kompakte Instrumentarien für einen sicheren Operationsverlauf.

