

Pfannensetzinstrumente

Gerade, Offset und Premium Pfanneneinsetzer



	erstellt	geprüft	freigegeben
Unterschriften	<u>M. Busted</u> M. Busted (Jul 9, 2026 08:40:52 GMT+2)	<u>C. Zuther</u> C. Zuther (Jul 9, 2026 09:02:25 GMT+2)	<u>S. Burke</u>

Gerader Pfanneneinsetzer

Das klassische Einsetzinstrument für zementfreie Pfannen mit Polbohrung

Präzision in bewährtem OHST-Design

Das Einsetzinstrument überzeugt durch das **gradlinige, funktionale Design**, das für Zuverlässigkeit und intuitive Bedienbarkeit steht.

Es ist **leichtgewichtig, gut ausbalanciert** und mit einem **ergonomischen Handgriff** ausgestattet.


Die Fixierung der Pfanne erfolgt über das Gewinde an der Polbohrung.

Bereits ein **leichtes Linksdrehen des Handgriffs** genügt, um das Einsetzinstrument zu lösen.

Das Absetzen erfolgt aufgrund des innovativen Pendelgewindes **ohne zusätzliche Bewegungsimpulse** auf die implantierte Pfanne – für ein **schonendes, kontrolliertes und sicheres Arbeiten** im Operationsfeld.



367-1465 Setzinstrument Pfanne gerade M12x1

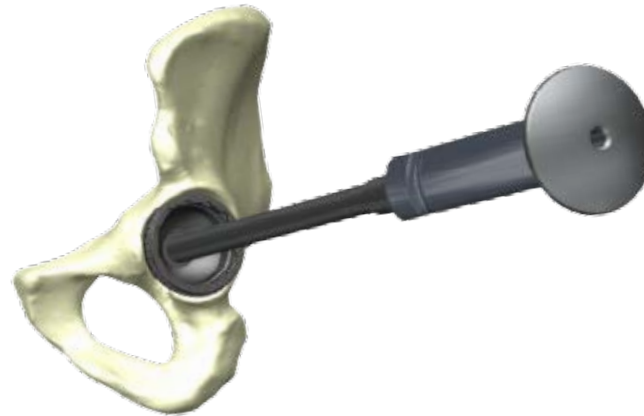

Material: Edelstahl, Silikonhandgriff

Gewicht: 777 g

Länge: 450 mm

Gewinde: M12x1
(andere Gewinde möglich)

Pfanneneinsetzer MIS

Für gute Sichtbarkeit bei Minimalinvasivem Zugang

Der **Pfanneneinsetzer** für den Minimal Invasiven Zugang lässt sich zusammen mit dem Schraubendreher mühelos an der Polbohrung fixieren. Der großzügige Offset von 42mm unterstützt die **Visualisierung der Pfannenposition**.

Ideal für eine gute Sichtbarkeit bei engen Zugängen und die Anwendung bei unterschiedlichen anatomischen Gegebenheiten.

Auf Wunsch prüfen wir die Kompatibilität mit Ihrer Hüftpfanne beziehungsweise die Anpassungsmöglichkeiten an Ihr bestehendes System.



367-1571 Setzinstrument Pfanne MIS M12x1
367-1478 Schraubendreher für Setzinstrument Pfanne MIS

Material: Edelstahl, Silikonhandgriff
Gewicht: 1065g
Länge: 435 mm
Gewinde: M12x1
M8
(andere Gewinde möglich)

Premium Pfanneneinsetzer mit Setzköpfen

Schonend. Sicher. Smart gesetzt.

Ideal für die Kombination mit Keramikinlays

Der Premium Pfanneneinsetzer mit Setzköpfen ist als **Gerade** und **Offset Variante** erhältlich und ermöglicht das Einsetzen der Pfanne ohne Öffnen der Polbohrung.

In Kombination mit dem passenden **Setzkopf** entsteht ein präziser **Schnellverschlussmechanismus**, der ein schnelles, sicheres Einsetzen und Lösen der Pfanne erlaubt – ganz ohne zusätzliches Handling am Polgewinde.

Für die korrekte Ausrichtung können die Pfanneneinsetzer mit **Ausrichtstäben** verbunden werden, wodurch eine sichere und reproduzierbare Positionierung unterstützt wird.

Der Premium Pfanneneinsetzer ist die optimale Lösung, wenn zementfreie Pfannen mit empfindlichen Keramikinlays implantiert werden sollen.

Er schützt die Pfannengeometrie und sorgt für ein kontrolliertes, schonendes Handling während der gesamten Implantation.

Sehen sie auch unseren [CERA-Guide](#) für das Sichere Einsetzen von Keramikinlays.



Premium Pfanneneinsetzer mit Setzköpfen

Funktionsbeschreibung

Den zum Pfanneninnendurchmesser korrespondierenden Setzkopf durch Schrauben an den Griff anbringen. Das **Ziehen des Hakens** öffnet die Backen am Setzkopf.

Positionieren Sie die Pfanne so, dass die Platte des

Setzkopfes auf der Planfläche der Pfanne aufliegt.

Beim **Lösen des Hakens** schließen sich die Backen und fixieren die Pfanne sicher am Setzkopf.

Mit moderaten Hammerschlägen wird die Pfanne anschließend in das vorgefräste Bett eingebracht.

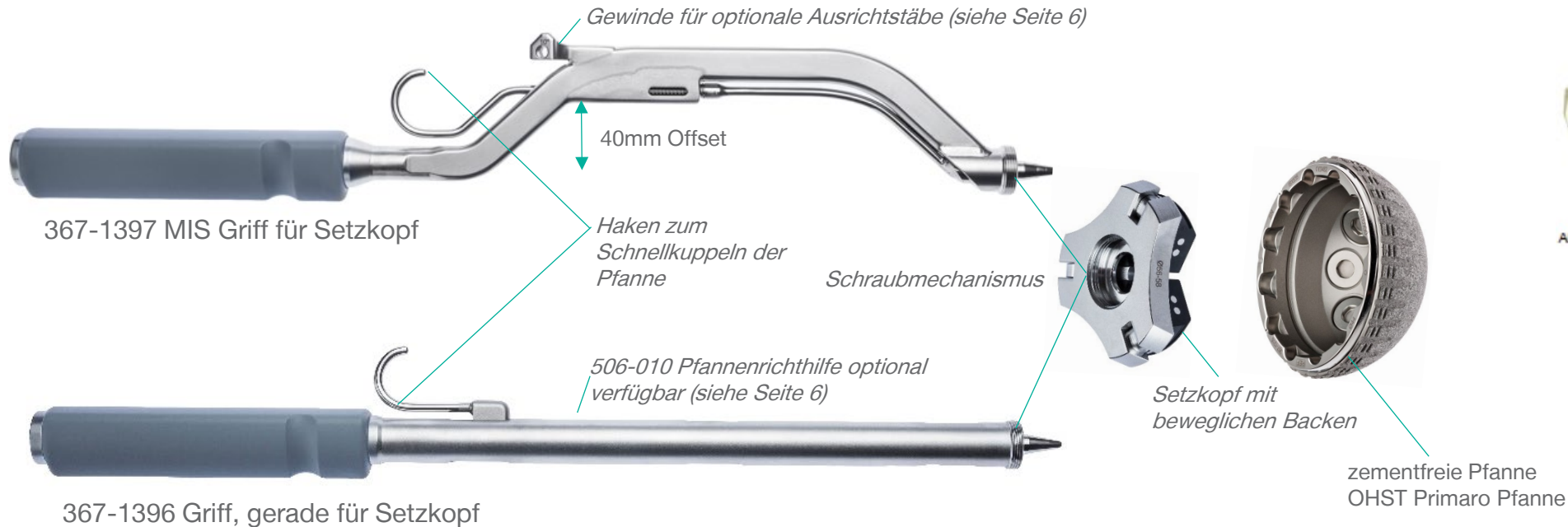


Abbildung 8: Implantation Pfanne mit geradem Griff



Abbildung 9: Implantation Pfanne mit MIS Griff

Material: Edelstahl, Silikonhandgriff

Gewicht: Gerader Handgriff 725 g
Offset Handgriff 703 g

Länge: Gerader Handgriff 397 mm
Offset Handgriff 414 mm

Pfannenrichthilfen

Für genaue Pfannenpositionierung

Pfannenrichthilfe – für maximale Genauigkeit

Beim Einsetzen einer Hüftpfanne kommt es auf eine **exakte Positionierung im Becken** an.

Die optionale erhältliche Pfannenrichthilfe unterstützt den Operateur dabei in entscheidenden Schritten:

- **Zuverlässige Ausrichtung** der Pfanne in der gewünschten Winkelstellung

- **Stabile Führung** während des Einschlagens
- **Präzises Arbeiten** auch bei eingeschränkter Sicht im Operationsfeld

Die Pfannenrichthilfe ist ein entscheidendes Zubehör für eine **präzise Implantation**.



2x 206-006 Ausrichtstab



506-010I-II Pfannenrichthilfe


506-010 Pfannenrichthilfe
mit Ausrichtstäben



367-1465 Setzinstrument Pfanne gerade M12x1
506-010 Pfannenrichthilfe



367-1397 MIS Griff für Setzkopf
206-006 Ausrichtstab (2x)

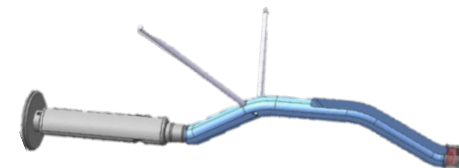

367-1571 Setzinstrument Pfanne MIS M12x1
206-006 Ausrichtstab (2x)

Pfannensetzinstrumente

Artikelliste

Art.-Nr.	Bezeichnung
Einsetzinstrumente für zementfreie Pfannen mit Polbohrung	
367-1465	Setzinstrument Pfanne gerade M12x1
367-1571	Setzinstrument Pfanne MIS M12x1
367-1566	Setzinstrument Pfanne MIS M8
367-1478	Schraubendreher für Setzinstrument Pfanne MIS
Premium Pfanneneinsetzer mit Setzköpfen	
367-1396	Griff, gerade für Setzkopf
367-1397	MIS Griff für Setzkopf
367-1391	Setzkopf Pfanne Ø44 mm
367-1392	Setzkopf Pfanne Ø46-50 mm
367-1393	Setzkopf Pfanne Ø52-54 mm
367-1394	Setzkopf Pfanne Ø56-58 mm
367-1395	Setzkopf Pfanne Ø60-68 mm
Pfannenrichthilfen	
506-010	Pfannenrichthilfe mit Ausrichtstäben
206-006	Ausrichtstab

Anpassung an Ihr Corporate Design möglich:

- ✓ Eigenes Logo
- ✓ Unterschiedliche Silikongrifffarben verfügbar
- ✓ Geometrie an Ihre Pfanne anpassbar

Optionales Zubehör

206-003	Hammer, Vollmetall 1300g
00-092-10	Kardanschraubendreher SW 3,5 mm

Weitere Schraubeninstrumente finden sie auf unserer Webseite [hier](#).



206-003 Hammer, Vollmetall 1300g



00-092-10 Kardanschraubendreher SW 3,5 mm

Kontakt & Bestellung



+49 3385 5420 0



sales@ohst.de



OHST Medizintechnik AG
Grünauer Fenn 3
14712 Rathenow
Germany



260707 | Produktinfo Pfannensetzinstrumente

Final Audit Report

2026-07-21

Created:	2026-07-09
By:	Sales Ohst (sales@ohst.de)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAANLtmz-pYtTiH5I1V1IdZZvi0ZPJxnF_X

"260707 | Produktinfo Pfannensetzinstrumente" History

 Document created by Sales Ohst (sales@ohst.de)

2026-07-09 - 6:35:24 AM GMT

 Document emailed to m.busteed@ohst.de for signature

2026-07-09 - 6:35:31 AM GMT

 Document emailed to c.zuther@ohst.de for signature

2026-07-09 - 6:35:31 AM GMT

 Document emailed to Stephan Dunke (s.dunke@ohst.de) for signature

2026-07-09 - 6:35:31 AM GMT

 Email viewed by m.busteed@ohst.de

2026-07-09 - 6:35:54 AM GMT

 Signer m.busteed@ohst.de entered name at signing as M. Busteed

2026-07-09 - 6:40:50 AM GMT

 Document e-signed by M. Busteed (m.busteed@ohst.de)

Signature Date: 2026-07-09 - 6:40:52 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE

 Email viewed by c.zuther@ohst.de

2026-07-09 - 7:02:03 AM GMT

 Signer c.zuther@ohst.de entered name at signing as C. Zuther

2026-07-09 - 7:02:23 AM GMT

 Document e-signed by C. Zuther (c.zuther@ohst.de)

Signature Date: 2026-07-09 - 7:02:25 AM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: TYPE

 Email viewed by Stephan Dunke (s.dunke@ohst.de)

2026-07-21 - 12:49:28 PM GMT



Document e-signed by Stephan Dunke (s.dunke@ohst.de)

Signature Date: 2026-07-21 - 12:50:01 PM GMT - Time Source: server - Signature Appearance Selected: IMAGE



Agreement completed.

2026-07-21 - 12:50:01 PM GMT



Adobe Acrobat Sign