


Prima Curve 2.0 Offset Fräserwelle

Bedienungsanleitung

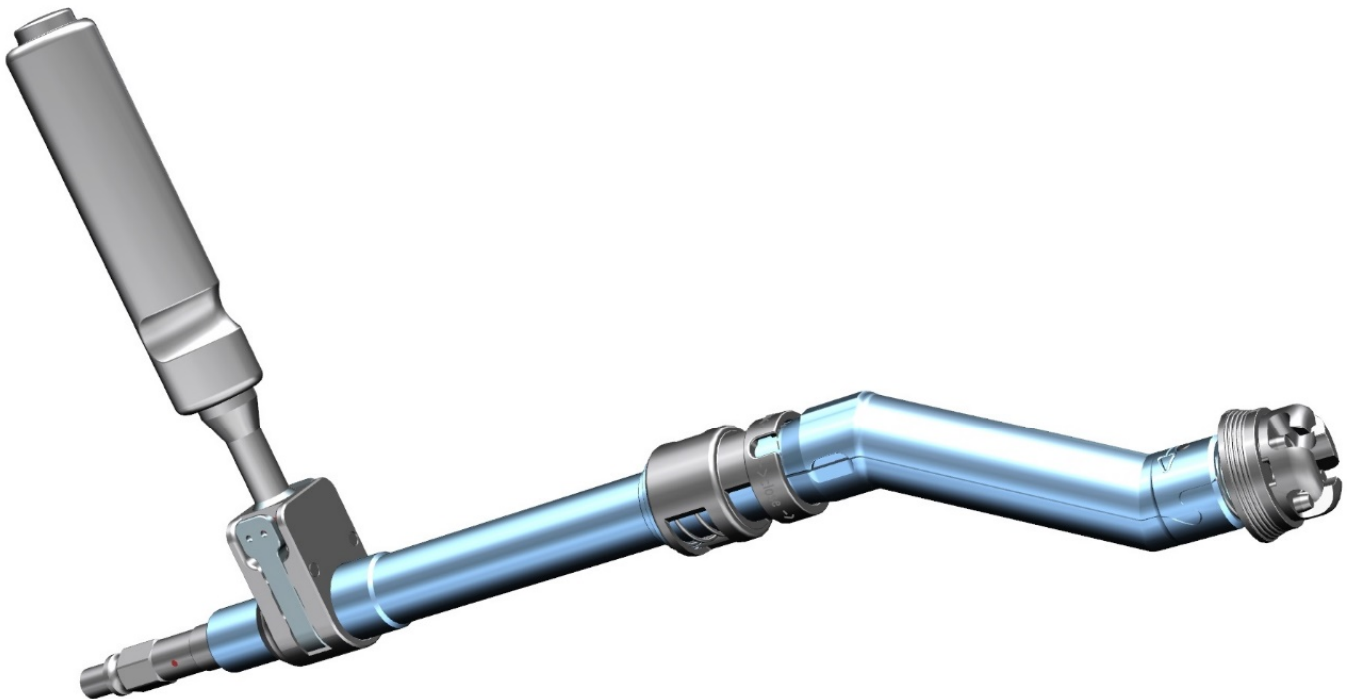

INHALT

EINLEITUNG UND PRODUKTBESCHREIBUNG	3
Anwendung der Prima Curve 2.0	4
Demontage / Montage	5
INSTRUMENTE Prima Curve 2.0	9
Reinigungshinweis	10

EINLEITUNG UND PRODUKTBESCHREIBUNG

Die *Prima Curve 2.0* dient der Vorbereitung des Acetabulums zur Implantation einer künstlichen Hüftpfanne. Das abgewinkelte Design erlaubt den Einsatz in minimalinvasiven Operationsverfahren und verbessert die Zugänglichkeit zum Operationsfeld. Der verstellbare Griff mit Rastmechanismus ermöglicht eine ergonomische Handhabung und sicheres Arbeiten unter verschiedenen Zugangsbedingungen.

Die Anwendung erfolgt in Kombination mit sphärischen Acetabulumfräsern. Diese sind separat bei der OHST Medizintechnik AG erhältlich.

Hinweis: Wenn Sie Fräser verwenden, die nicht von der OHST Medizintechnik AG erworben wurden, muss vor der Anwendung die Kompatibilität geprüft werden.

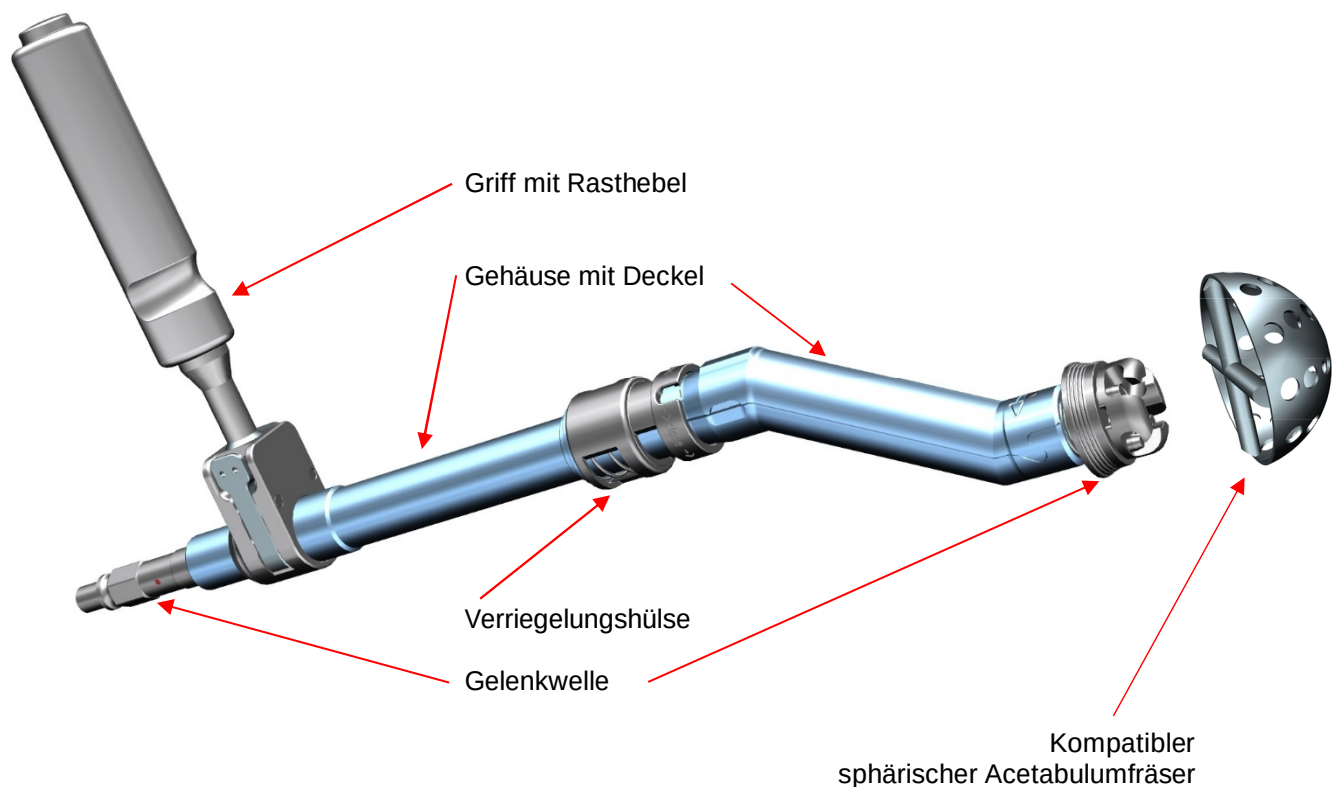


Abbildung 1: Prima Curve 2.0

Anwendung der Prima Curve 2.0

- Der Handgriff kann durch Drücken der beiden Rasthebel gelöst und in die gewünschte Position gedreht werden. Die Position des Griffs ist in 45° Schritten verstellbar.

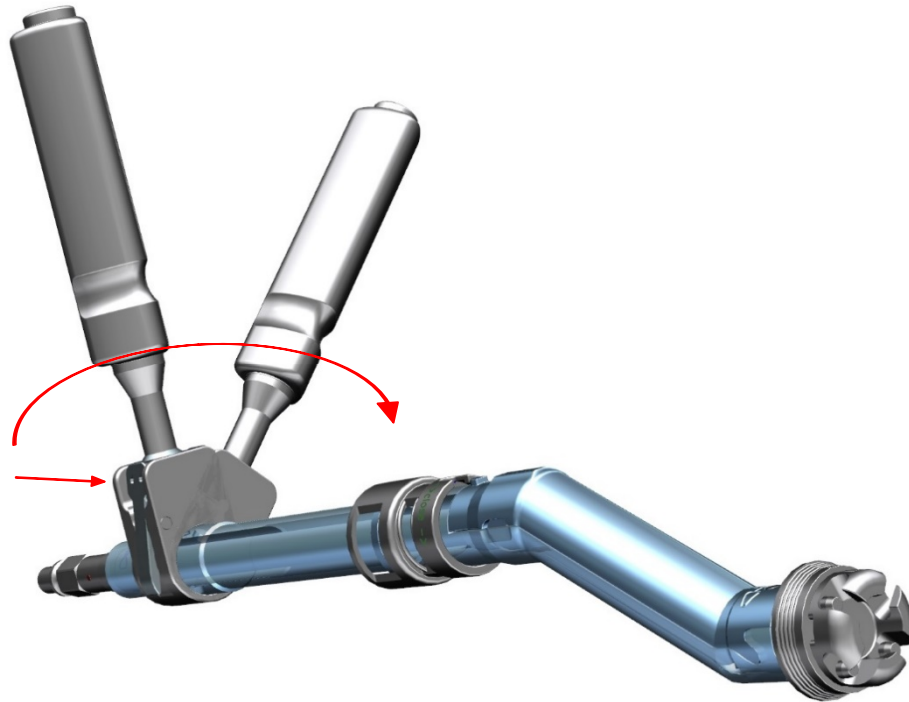


Abbildung 2: Prima Curve 2.0, **Position des Griffs durch Rasthebel anpassen**

- Beim Konnektieren des Acetabulumfräasers durch Aufstecken (1) und anschließender Verdrehung (2) erfolgt die Arretierung an der Fräseraufnahme selbsttätig – Ausnahme siehe Abbildung 4.

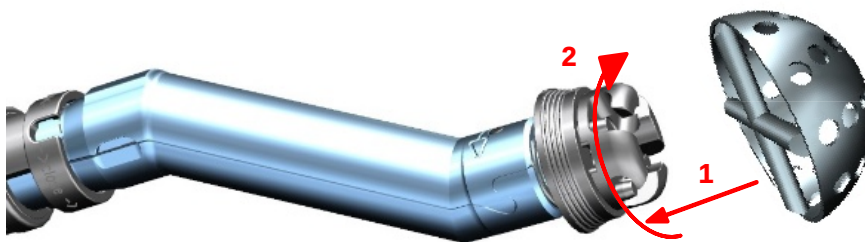


Abbildung 3: Prima Curve 2.0, Selbstverriegelung bei Konnektierung eines Acetabulumfräasers

- Der Ring zum Arretieren des Fräasers kann durch zurückziehen und verdrehen in eine „Dauer-Offen“ Position gesetzt werden, z. B. für MIS-Anwendung zur Konnektierung / Dekonnektierung in der Wunde.

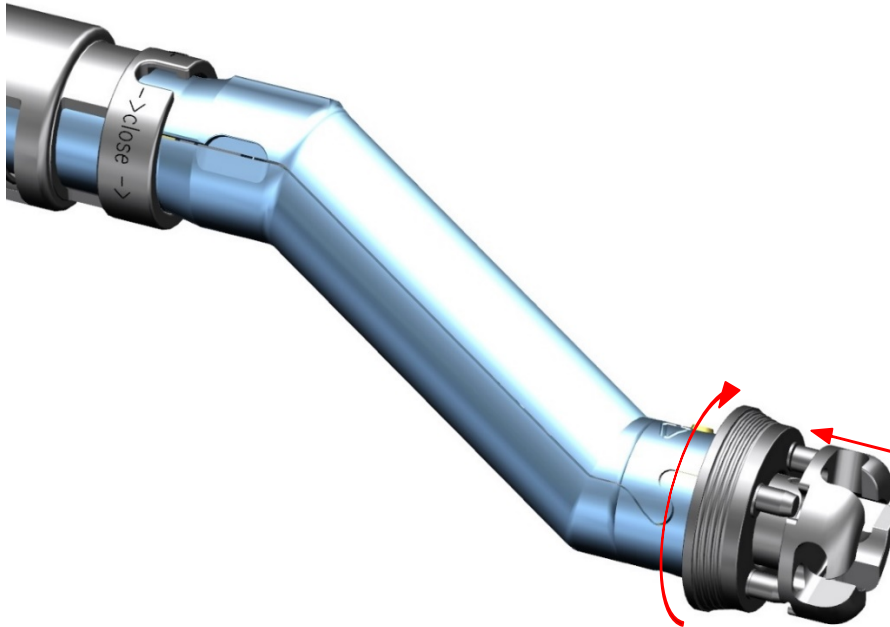


Abbildung 4: Prima Curve 2.0, **Ring mit 4 Stiften** in „Dauer-Offen“ Position

Demontage / Montage

- Der Griff kann durch das Betätigen der beiden Rasthebel montiert und demontiert werden.

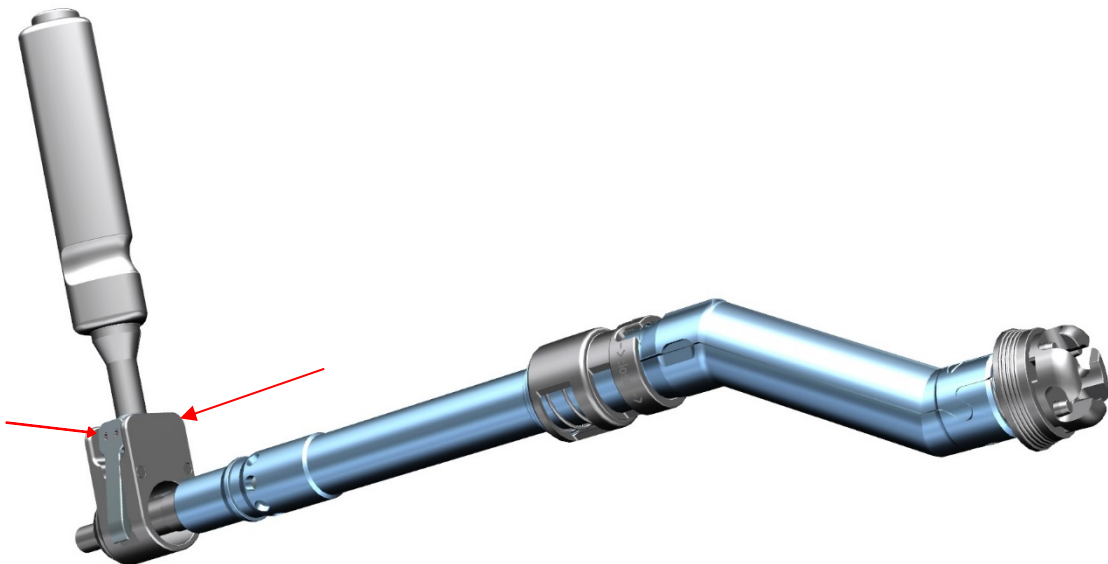


Abbildung 5: Prima Curve 2.0, **Griff Montage**

- Verriegelungshülse und Gehäusedeckel öffnen: Die Verriegelungshülse ist durch Verdrehen (1) und anschließendes Verschieben (2) in die Öffnungsposition zu bringen, um danach den Gehäusedeckel zu öffnen.
- Den Gehäusedeckel zunächst von der Seite der Verriegelungshülse anheben (3) und dann in Richtung des Griffes herausziehen (4).

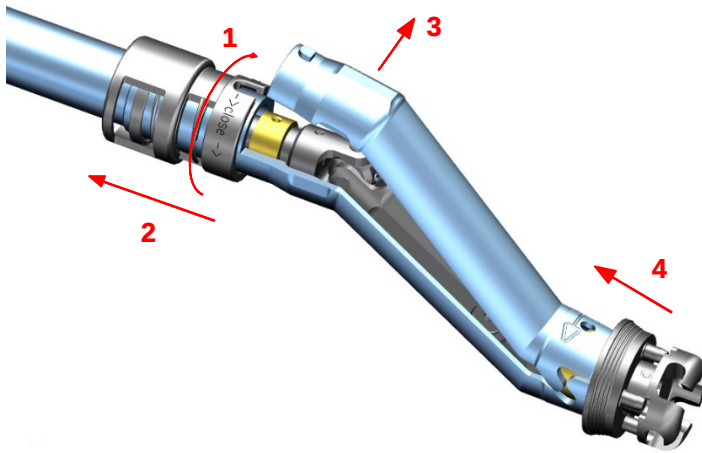


Abbildung 6: Prima Curve 2.0 **Gehäusedeckel demontieren**

- Gelenkwelle ausheben: Zunächst die Fräseraufnahme (1) und danach das Wellenlager (2) aus dem Gehäuse lösen.

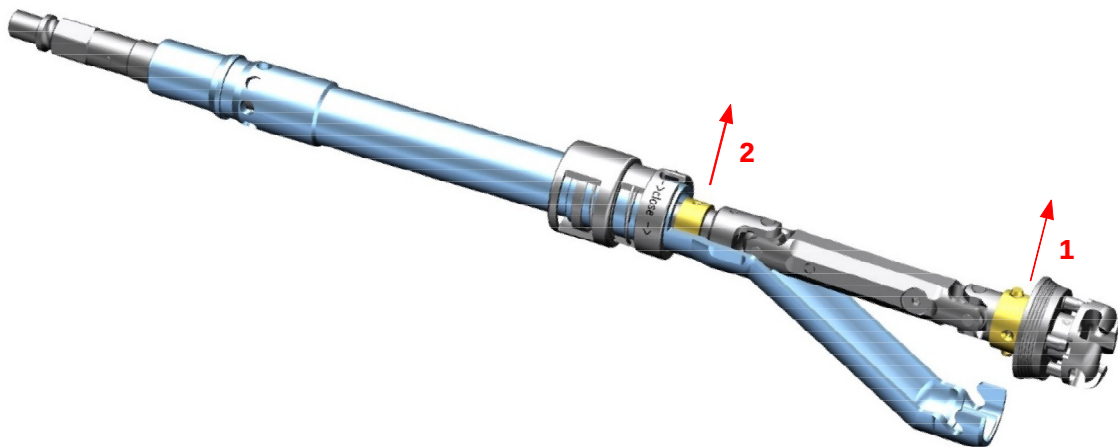


Abbildung 7: Prima Curve 2.0, **Gelenkwelle ausheben**

- Gelenkwelle herausziehen: Gelenkwelle vollständig aus dem Gehäuse entnehmen.

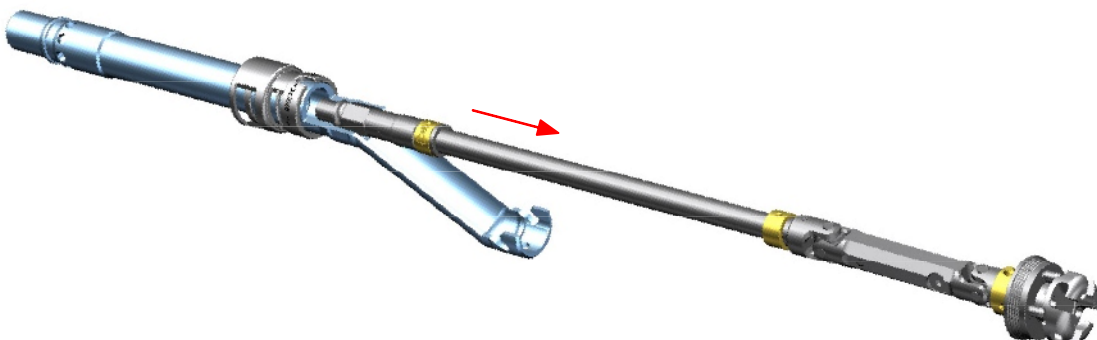


Abbildung 8: Prima Curve 2.0, **Gelenkwelle ausheben**

- Die Montage der Prima Curve 2.0 erfolgt in umgekehrter Reihenfolge zur Demontage.
- Beim Einsetzen der Gelenkwelle ist darauf zu achten, dass der Zapfen der Gelenkwelle korrekt in der dafür vorgesehenen Öffnung des Gehäuses positioniert wird.

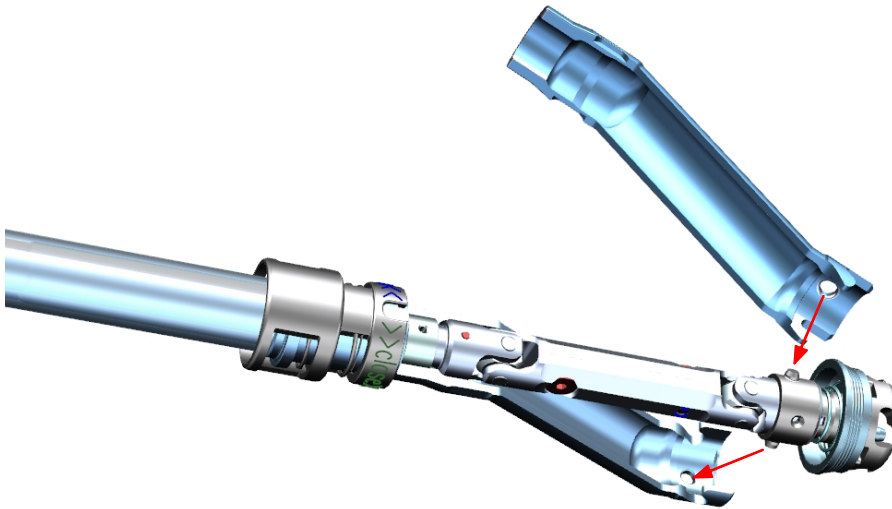


Abbildung 9: Prima Curve 2.0, **Hinweis zur Montage**

- Vorarretierung: Die Verriegelungshülse sichert in jeder Rotationsstellung den Deckel gegen unbeabsichtigtes Öffnen.

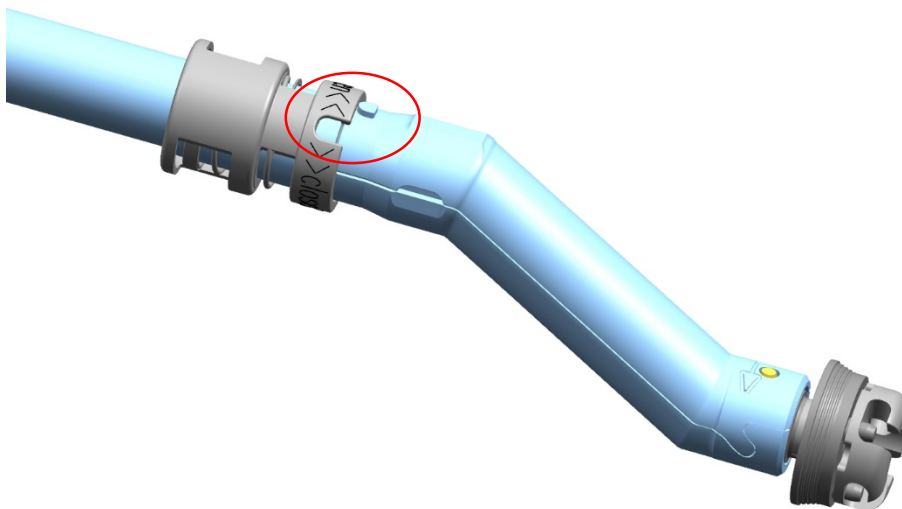


Abbildung 10: Prima Curve 2.0, **Vorarretierung der Verriegelungshülse**

- Zur finalen Verriegelung muss die Nut der Verriegelungshülse zum Zapfen des Deckels ausgerichtet, auf die Hülse aufgeschoben und anschließend nach rechts verdreht werden.

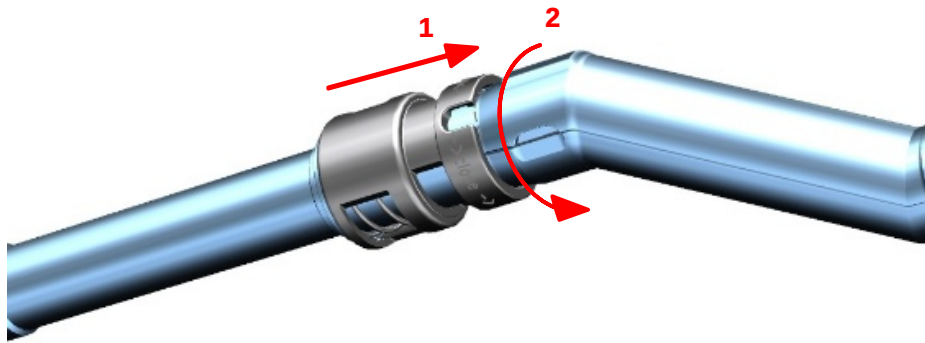


Abbildung 11: Prima Curve 2.0, **Funktion der Verriegelungshülse**

■ Prima Curve 2.0 Bestandteile demontiert

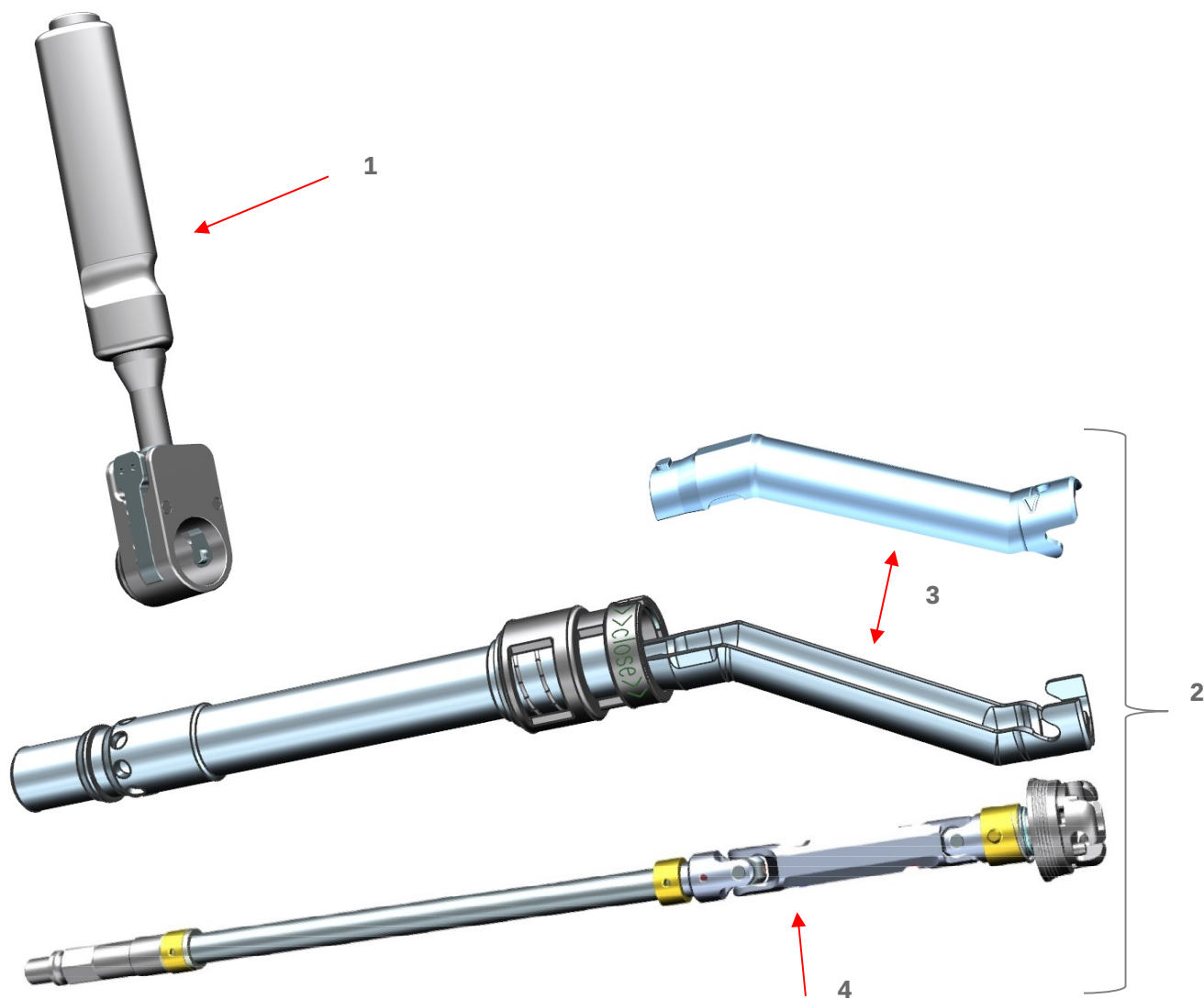


Abbildung 12: Prima Curve 2.0 Teile Übersicht

INSTRUMENTE Prima Curve 2.0

Siehe Abbildung 12: Prima Curve 2.0 Teile Übersicht


Nr.	Instrument	Art.-Nr.
1	Griff mit Rasthebel	349-111
2 *	Prima Curve 2.0 mit AO-Anschluss	349-110-AO
Bestandteile Prima Curve 2.0		
3	Gehäuse mit Deckel	349-110-1
4 *	Gelenkwelle mit AO-Anschluss	349-110-AO-2

* weitere Anschlüsse auf Anfrage

Reinigungshinweis

- Prima Curve 2.0 für die Reinigung zerlegen
- Bewegliche Komponenten sind nachstehend mit Pfeilen markiert

Hinweis: Detaillierte Informationen zur Reinigung und Desinfektion von Instrumenten finden Sie in der Gebrauchsanweisung Wiederverwendbare Instrumente und Trays (50000354) auf unserer Webseite <https://www.ohst.de/ifu-gebrauchsanweisungen/>.

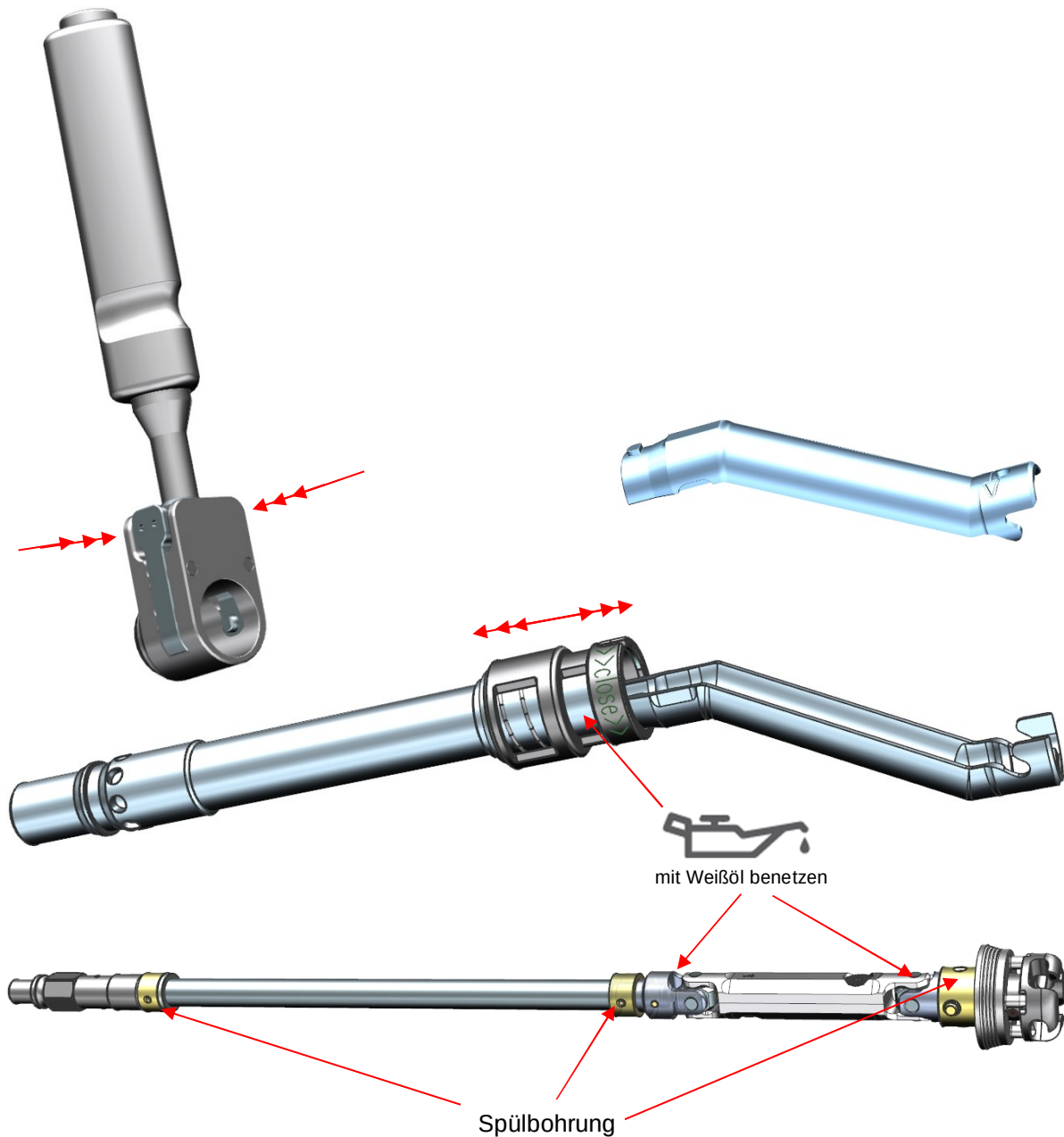



OHST Medizintechnik AG

Grünauer Fenn 3
14712 Rathenow
Deutschland

Tel. +49 3385 5420-0
Fax +49 3385 5420-99
E-Mail info@ohst.de
URL www.ohst.de

Haftungsausschluss

Dieser Gebrauchshinweis richtet sich ausschließlich an Personen aus den Fachkreisen der Medizintechnik.
Sie dient ausdrücklich nicht der Information von medizinischen Laien.
Die Erläuterungen über die in der Anleitung enthaltenen Produkte sind allgemein gehalten und stellen keinen ärztlichen Rat dar.

Die Anleitung wurde von medizinischen Experten und technisch qualifizierten Mitarbeitern der OHST AG nach bestem Wissen erarbeitet und zusammengestellt.

Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit und Vollständigkeit der hierin zur Verfügung gestellten Informationen wird nicht übernommen.
Jede Haftung für Schäden materieller oder immaterieller Art, die durch die Nutzung der Informationen verursacht werden, wird ausgeschlossen.